

ALIGNE LES DENTS
en denture
permanente



TRAINER4™
Alignment

DÉTAILS DES BREVETS MONDIAUX DISPONIBLES À MYORESEARCH.COM

MODE D'EMPLOI

UTILISEZ LE T4A™ POUR UN MINIMUM DE UNE À QUATRE HEURES PENDANT LA JOURNÉE ET LA NUIT EN DORMANT


Utilisez le T4A™ en étudiant, en lisant, en regardant la TV, devant votre ordinateur, ou en travaillant. Lorsque vous avez terminé, rincez-le soigneusement sous l'eau, puis remettez-le dans sa boîte. Vos dents antérieures peuvent devenir légèrement sensibles au début. C'est normal, mais si la sensibilité devient excessive, réduisez le temps de port du T4A™, puis revenez au temps de port normal quand la sensibilité est passée.

Le T4A™ rigide Phase Deux peut être mis en place graduellement en commençant par une à quatre heures le jour et en continuant avec le T4A™ Phase Un, plus souple, la nuit.


NE MÂCHOUILLEZ PAS le T4A™



Étape 1: Tenez le T4A™ languette linguale vers le haut.

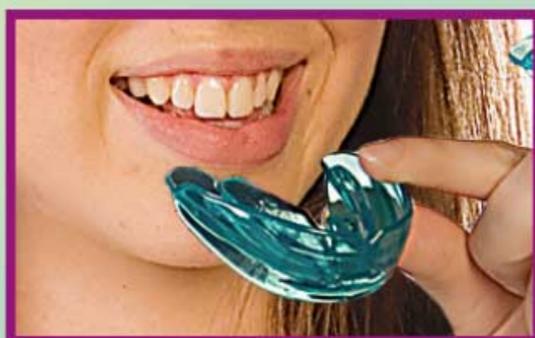

Étape 2: Placez le T4A™ dans votre bouche.

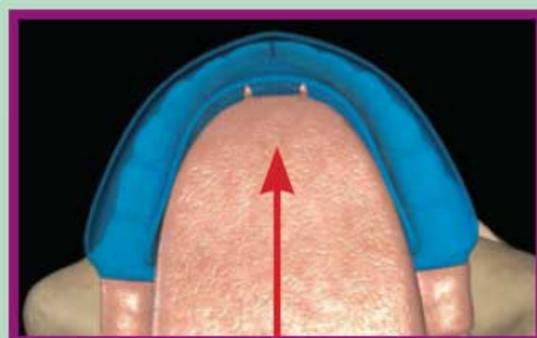

Étape 3: Gardez la langue sur la languette linguale.




Étape 4: Fermez la bouche sur le T4A™ et sentez-le essayer d'aligner vos dents antérieures et vos mâchoires



Étape 5: Gardez les lèvres jointes et respirez par le nez.

Votre praticien pourra modifier ces instructions pour un plan de traitement différent.

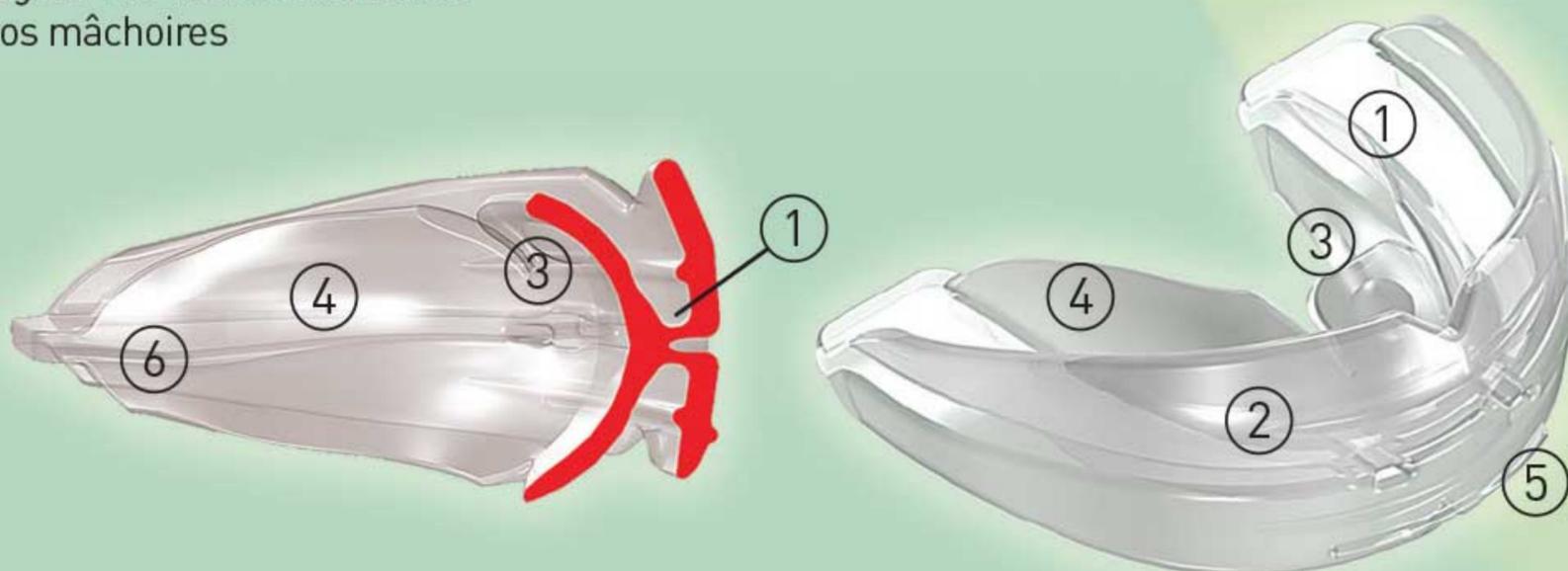

Utilisez le T4A™ en étudiant, en lisant, en regardant la TV, devant votre ordinateur, ou en travaillant.

ASTUCES TRAINER

- Si le **T4A™** tombe pendant la nuit à cause d'une posture linguale ou de la respiration buccale, vous devez persévérer pour le porter. Ces habitudes doivent être corrigées et, une fois que le **T4A™** reste en place toute la nuit, vous avez gagné.
- Votre bouche doit rester fermée la plupart du temps, gardez vos lèvres jointes quand le **T4A™** est en place. Quand le **T4A™** n'est pas dans votre bouche, vos lèvres doivent être jointes en douceur et vous devez respirer par le nez.
- Souvenez-vous de garder le bout de votre langue à la position approximative de la languette linguale, même quand vous n'utilisez pas le **T4A™**.
- Utilisez-le pendant un minimum de six à douze mois.
- Si le port nocturne n'est pas possible, augmentez le port diurne.
- Attendez-vous à voir des modifications dentaires en 4 à 6 semaines. Vous devriez aussi voir à court terme une amélioration des fonctions (observez l'amélioration de la respiration nasale et de la position des lèvres et de la mâchoire).

CARACTÉRISTIQUES DU T4A™

SYSTÈME DE GUIDAGE DENTAIRE

Le **T4A™** possède un Système de Guidage Dentaire incorporé (fonction similaire à un arc orthodontique).

- ① **Les gouttières dentaires** sont moulées à la forme correcte de l'arcade dentaire et maintiennent la mandibule en position correcte.
- ② **Arcs vestibulaires** (exercent une force légère sur les dents antérieures mal alignées).

EFFET MYOFONCTIONNEL™

- ③ **La languette linguale** pour le placement correct du bout de la langue, comme dans les thérapies fonctionnelles et orthophoniques.
- ④ **La cage à langue** empêche la posture linguale et vous encourage à respirer par le nez.
- ⑤ **Les lips bumpers** découragent l'hyperactivité musculaire des lèvres.

DÉVELOPPEMENT DE LA MANDIBULE

- ⑥ **La base en forme d'aile d'avion** aide le développement de la mandibule. Lorsqu'il est en place, la mandibule est en position correcte grâce à la prévention à la fois de la respiration buccale et de la posture linguale

Le **T4A™** pour **ALIGNEMENT** fait partie du système **TRAINER** de **Myofunctional Research Co.**

Les mauvaises habitudes fonctionnelles, comme une position et une fonction incorrectes de la langue et la respiration buccale causent souvent un mauvais alignement dentaire.

L'effet Myofonctionnel™

Tous les appareils du *TRAINER System™* sont conçus pour rééduquer la musculature orale (*le Myofunctional Effect™*). Cela aide à la correction de l'alignement des dents et de la mâchoire.

La combinaison des outils de correction des habitudes et d'alignement dentaire incorporés au *TRAINER System™* permet un traitement orthodontique moins complexe (souvent sans brackets) et donne un résultat plus permanent.

Nettoyer votre T4A™ : Nettoyez votre appareil *T4A™* sous l'eau chaude chaque fois que vous le retirez de votre bouche. Utilisez les tablettes *Myoclean™* pour le nettoyer à fond deux fois par semaine. Interrogez votre praticien sur les tablettes *Myoclean™*, le nettoyant recommandé pour tous les appareils *MRC*.

ATTENTION: À N'UTILISER QUE SOUS LA SUPERVISION D'UN ORTHODONTISTE OU D'UN DENTISTE



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION**

www.myoresearch.com - www.myobrace.com

E U R O P E - U S A - A U S T R A L I A