



BIOBLOCの使用説明

BIOBLOCステージ1

Bioblocは、**上顎を拡大**するための取り外し可能な装置です。ワイヤーによって、前歯は前上方向に動き、拡大スクリューが臼歯部を拡大します。

舌と歯のスペースを確保することが上顎拡大の目的です。はじめは上顎の前歯が突出して見えますが、これは正常です。さらに、歯の間に隙間が生じるかもしれませんが、これは後に塞がります。



拡大スクリューの回転

毎日/2日に1回

中央のスクリューを毎日または2日に一回回します。

専用のキーで、矢印の方向に半分回します。

そうすることでBioblocが両サイドに拡大され、中心に隙間ができます。

スクリューは毎日同じ時間に回し、調整したら記録に残すことをお勧めします。



BIOBLOCの使用

装着時間

効果を発揮するには、**1日最低22時間**装着する必要があります。それはクリーニング、食事、アクティブなスポーツをするときのみ取り外すということです。

Bioblocステージ1を6~9ヶ月間装着します。最初の3~4ヶ月間で積極的に拡大されます。

装置をしばらく装着しないしていると、歯や顎が元に戻り装置がきちんと適合しなくなります。最終的には装着することができなくなり治療が長引くこととなります。

装置は必要な時だけ外すようにしてください。

取り外し

取り外すときは、後方のワイヤーを使って外してください。再装着するときは、装置後方の両サイドの中心辺りを親指で強く押してください。

クリーニング

口から取り外したら毎回**Biobloc**を流水で洗い流してください。また、しっかりと洗浄するために**Myoclean™**タブレットを週に2回使用して下さい。



JAPAN - 日本総代理店
株式会社 オーティカ・インターナショナル
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-5-4F
Ph: +81 3 3353 3676
Fax: +81 3 3353 3830
order@orthika.jp

AUSTRALIA - HEAD OFFICE
Ph: +61 7 5573 5999
Fax: +61 7 5573 6333
Toll Free: 1800 074 032
australia.hq@myoresearch.com

EUROPE
Ph: +31 416 651 696
Fax: +31 416 652 745
Toll Free: 00 800 6962 7223
europa.hq@myoresearch.com

国際特許。詳細はMYORESEARCH.COMをご覧ください。