




BENT WIRE SYSTEM (BWS) 使用説明

BWSは、上顎に舌のスペースを確保することで上下顎ともに正しいアーチフォームになるよう設計された拡大装置です。これによって、永久歯が正しい位置に生え揃うためのスペースも確保できます。

BWSは、Myobrace®システムまたはTrainer™システムと併用して安全かつ効果的に使用する必要があります。

指や舌で、BWS(ワイヤーやブラケット)をつまんだり遊んだりしないでください。そのような干渉があるとワイヤーは容易に曲がり、破損の原因にもなります。

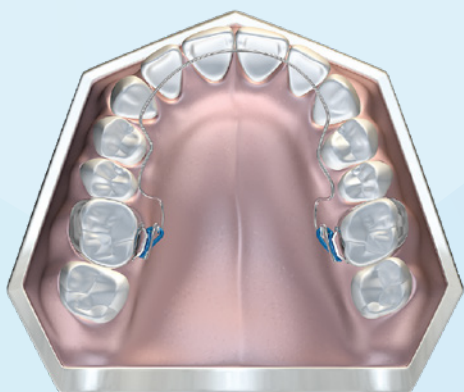

クリーニング

朝と夜の定期的なクリーニングに加えて、食後も良好な歯科衛生のために重要です。通常のブラッシングで構いませんが、BWSに損傷を与えないようワイヤーに注意し、歯の裏側に力をかけすぎないようにしてください。また、スペーサーやBWS周りをフロスする際は注意してください。繰り返しになりますが、これによりバンドやワイヤーが損傷または移動する可能性があります。使用説明に沿ってMyobrace®やTrainer™をMyoclean™で洗浄してください。

避けるべき食べ物

臼歯にバンドを装着するための十分な強度があり、必要なくなったときは簡単に取り外しが可能な接着剤で歯にBWSを固定します。BWSはブレースよりは強力ですが、破損することもあるので避けるべき食べ物がいくつかあります。とても硬い食べ物は、歯列を整えるために慎重に設計されたワイヤーを曲げたり破損させる可能性があります。また、ベタベタした食べ物はバンドを緩めたり、ワイヤーの下に挟まることがありますので、両方とも避けるべきです。糖分を多く含む食べ物は、容易に虫歯を引き起こす可能性があるため、BWSの有無にかかわらず摂取を控えるべきです。患者様がBWSを正しくケアすれば、治療期間は中断されることなく効率的に進みます。

問題が生じた場合

BWSによる歯科的な緊急事態はまれですが、小さな問題が発生することが時々あります。治療中に起こり得るいくつかの問題を裏面に表記しています。



BENT WIRE SYSTEM (BWS) 使用説明

スペーサーの紛失

スペーサーは、BWSを取り付ける前に特定の歯の間につける小さなゴムバンドです。

スペーサーはBWSの臼歯バンドを取り付けるために、歯の間に必要な隙間を確保するために必要なものなので、スペーサーで遊んではいけません。ほとんどの場合、スペーサーは勝手に外れます。もしこれが次回来院までの前日に起きたのであれば、臼歯バンドを取り付けるのに十分な隙間が確保できたという意味なので心配ありません。もし次回来院の予定日まで数日あるようなら、確保された隙間がなくなる前にスペーサーを再度取り付けるために来院する必要があります。

初期の痛み

臼歯バンドとBWSを取り付けた直後は歯が敏感になり、一週間ほど歯茎に痛みを伴う可能性がありますが、これは正常です。市販の鎮痛剤がこの初期の痛みを緩和するのに役立ちます。7日以上経過しても痛みが続く場合は、クリニックに連絡してください。最初の取り付けの日から2週間後にBWSのチェックを行い、調整します。

BWSの緩みや外れ

歯が急速に移動するとBWSが緩むことがあります。ワイヤーの強度を弱めたり破損の原因となるので遊ばないでください。通常、ワイヤーは次の来院まで歯に取り付けられたストッパーによって押し上げられます。BWSがストッパーからはずれてしまう場合、クリニックに連絡しワイヤーの調整を行ってください。

BWSワイヤーの破損

まれにワイヤーが破損したり外れることがあります。その場合すぐにクリニックに連絡してください。もしワイヤーの片側だけの破損や外れの場合、エラストイックリガチャー（臼歯バンドにワイヤーを固定している小さなゴム製バンド）を壊せば引き抜くことができます。

定期調整

BWSが取り付けられている間は、定期的な調整とチェックが不可欠です。最低でも4週間に1回は必要です。もしアポイントメントを逃した場合は、不要な歯の移動やワイヤーが口蓋に食い込むのを防ぐために、早急にアポイントメントを取り直してください。

繰り返しますが、BWSはMyobrace®を日中と夜間毎日装着し、更にMyobrace®アクティビティを組み合わせることで機能することを忘れないでください。

myobrace®

STRAIGHT TEETH THE NATURAL WAY